



Switch Driver 6

Handboek

Smartbox

Switch Driver 6 is een gratis applicatie die het mogelijk maakt om meer te doen met schakelaars. Schakelaars kunnen worden ingesteld als elke toetsaanslag of muis actie, waardoor vrijwel elke programma kan worden bediend dat met schakelaars is aan te sturen.

Installeer de software, sluit de schakelaars aan op de computer met een JoyCable of Joybox, en het is klaar om mee te werken!

N.B. Als de schakelaaraansluiting wordt ondersteund door de te gebruiken software, bijvoorbeeld The Grid 2, dan is Switch Driver niet nodig. Kijk in de software handleiding voor gebruik met schakelaars.

Installatie

Start het installatieprogramma van de bijgevoegde DVD, of vanaf onze installatie website www.thinksmartbox.com/switch-driver-6, en volg de eenvoudige instructies.

Zodra Switch Driver actief is, staat het icoon in de taakbalk. Klik op het icoon om de instellingen te wijzigen.




Aan de slag

Druk op de schakelaars en zie dat het icoon verandert in het instellingen venster.

Er zijn 2 voorbeelden van schakelaar acties om mee aan de slag te gaan:

- Spatie and Enter
- Muis klikken

Deze kunnen worden gewijzigd of maak er zelf een met elke gewenste muis of toetsenbord actie.

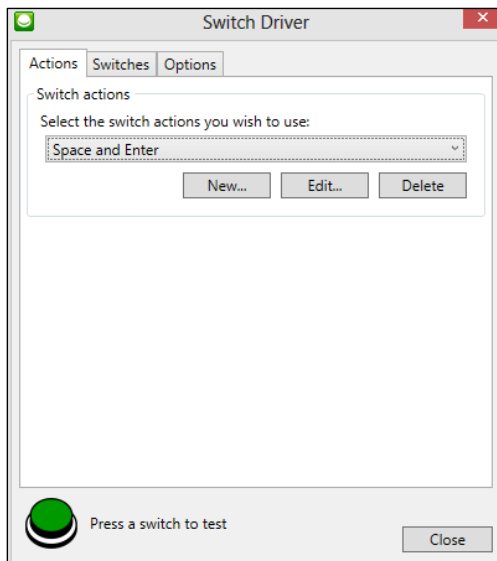


Elke schakelaar kan worden ingesteld om één van de volgende acties te doen:

- Indrukken van een toets op het toetsenbord (met shift, alt of control)
- Indrukken van een knop op de muis of het verplaatsen van de muis

Gebruikers instelling

Switch Driver kan worden ingesteld om het per ongeluk indrukken van de schakelaar te negeren in het tabblad Schakelaars.

In het tabblad Opties kan de muissnelheid worden aangepast of er kan een keuze worden gemaakt om Switch Driver te starten bij het Opstarten.

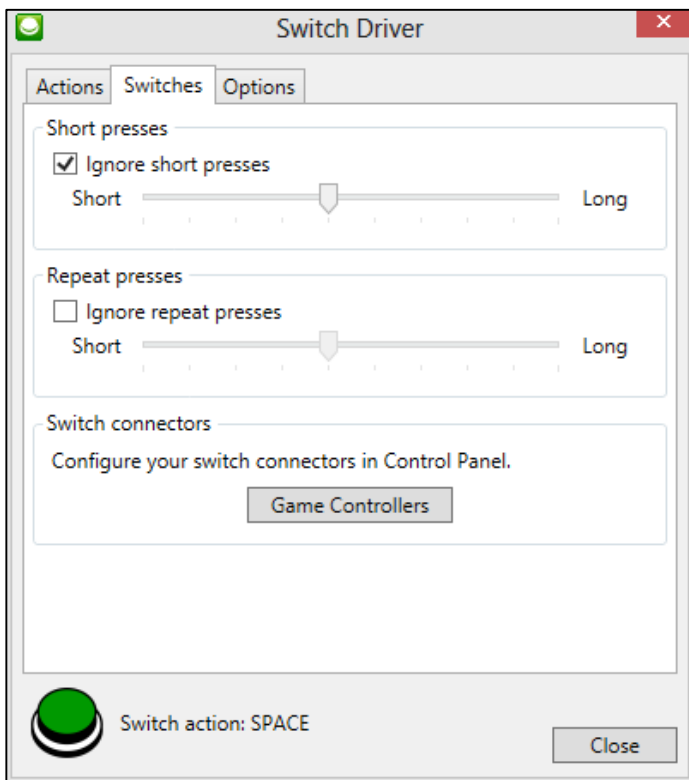



Smartbox