

Smartbox

Overzicht sneltoetsen



Sneltoetsen Grid 3 - in bewerkmodus:

F11	Start / Einde bewerken	F1	Help
Ctrl + X	Knip	F2	Knop label aanpassen
Ctrl + C	Kopiëren	F3	Zoek foto
Ctrl + V	Plakken	F4	Bewerk afbeelding
Ctrl + Z	Ongedaan maken	F5	Verwijder afbeelding
Ctrl + S	Opslaan	F10	Instellingen
Ctrl + A	Selecteer alles	F12	Verbergen / weergeven menubalk
Ctrl + D	Deselecteer alles	Pijlen	Navigatie knoppen (+ shift voor selectie)
Ctrl + J	Creëer linkcel	Enter	Knop maken
Ctrl + F	Volg link	Insert	Voeg commando toe
Ctrl + W	Creëer schrijfcel	Delete	Verwijder cel
		Alt	Brengt een lint naar boven om het menu met een toetsenbord te bedienen (alleen in bewerkmodus)

Sneltoetsen LookToLearn

A	Analyse
D	Zet terug naar default instellingen
P/V	P = aanpassen foto V = aanpassen video
S	Start LookToLearn
1-9	De nummers corresponderen met de verschillende spellen (links naar rechts)
Enter	Enter op het hoofdscherm start LookToLearn
Backspace	Terug naar het vorige scherm
Escape	Terug naar het vorige scherm / sluit activiteit

Meer weten? Kijk op

www.thinksmartbox.nl

